

# Heal-<sup>®</sup> Protection Boot

- Scarica il tallone per prevenire e gestire le ulcere
- Chiusure semplici ed efficaci
- Lascia libero il tallone
- Possibilità di ispezionare lo stato del tallone
- Misura universale idoneo per piede destro e sinistro

**HEALUP<sup>®</sup>**



Trattato con Agion e Silvadur antibatterici che inibiscono la crescita dei batteri

Un'apertura aggiuntiva offre la possibilità di ispezionare il tallone



Misura	Quantità	Codice	NHSSC Code
Universal	10	104-HUP10	GRA5129

Scan-code per vedere il video di modalità uso online



[www.heal-up.co.uk](http://www.heal-up.co.uk)

## MATERIALI

- **SUPERIORE:** TESSUTO A RETE: PANNO DI POLIESTERE 100%
- **IMBOTTITURA:** FIBRA DI POLIESTERE POLIESTERE: 100%
- **FODERA:** NYLEX POLIESTERE 100%
- **FISSAGGIO:** LOOP & HOOK NYLON 100%
- **FISSAGGIO:** CINGHIA LYCRA POLIESTERE 100%

Strap numerati 1 2 3 per una facile chiusura



Tessuto aggrappante privo di frizione



Apertura addizionale per ulteriori ispezioni del tallone


Tallone scarico

HEAL-UP®  
PROMEDICS  
GARELOCH ROAD, PORT GLASGOW  
SCOTLAND PA14 5XH  
T. 0141 841 2000  
F. 0141 841 2001  
WWW.PROMEDICS.CO.UK


# Heal-Up®

## Protection Boot


### Fitting Instructions

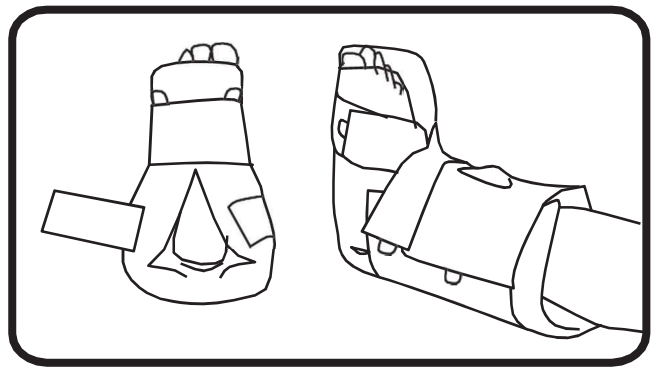


Promedics Orthopedics' Ltd.  
Port Glasgow Industrial Estate  
Gareloch Road, Port Glasgow  
Scotland PA14 5XH  
[www.promedics.co.uk](http://www.promedics.co.uk)

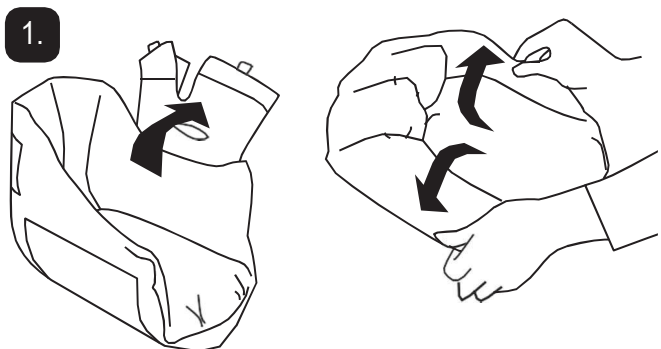


1. Apri le cinghie e piega i lati verso il basso / "al rovescio".

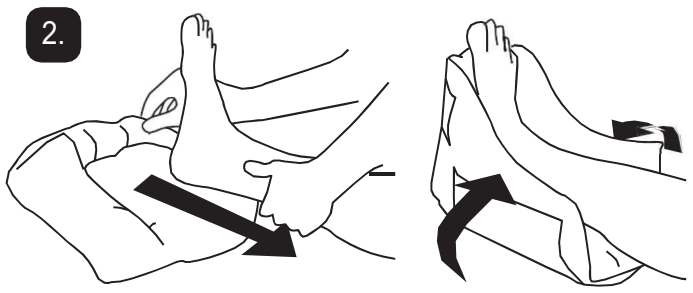


2. Far scorrere sotto il tallone, quindi piegare i lati intorno al piede / alla caviglia

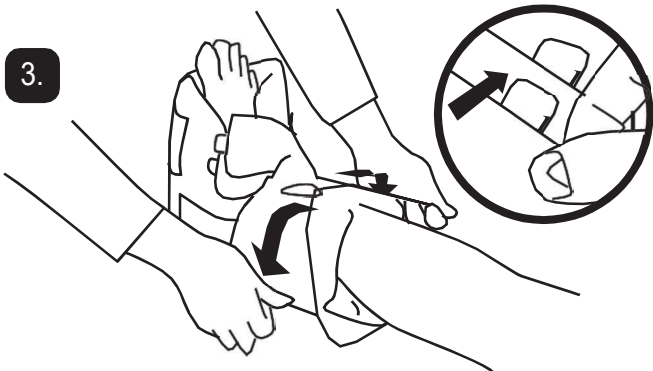


3. Stringere la cinghia 1, verso la linguetta del numero corrispondente. In modo uniforme su entrambi i lati. Non stringere eccessivamente.

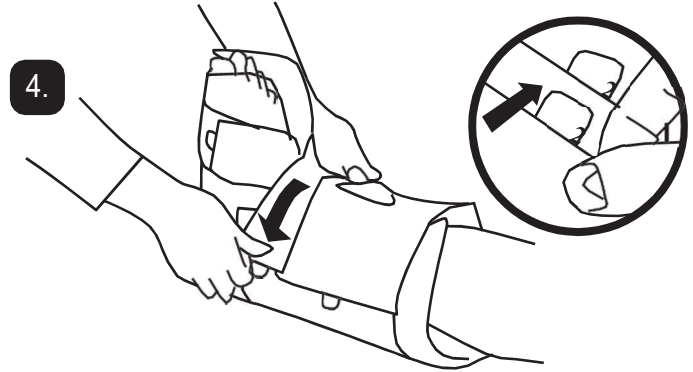

4. Stringere la cinghia 2, verso la linguetta del numero corrispondente. In modo uniforme su entrambi i lati. Non stringere eccessivamente.

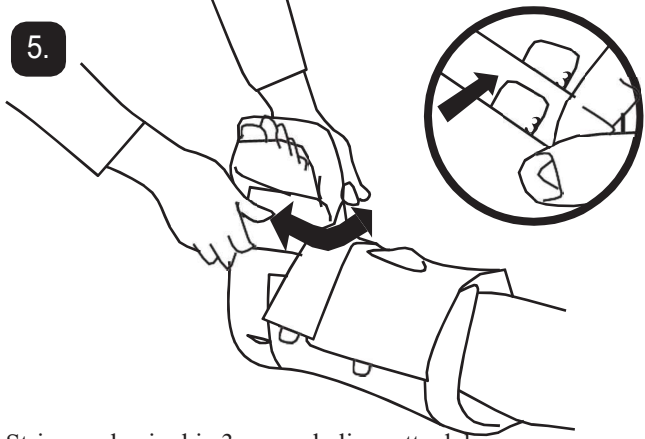

5. Stringere la cinghia 3, verso la linguetta del numero corrispondente. In modo uniforme su entrambi i lati. Non stringere eccessivamente.

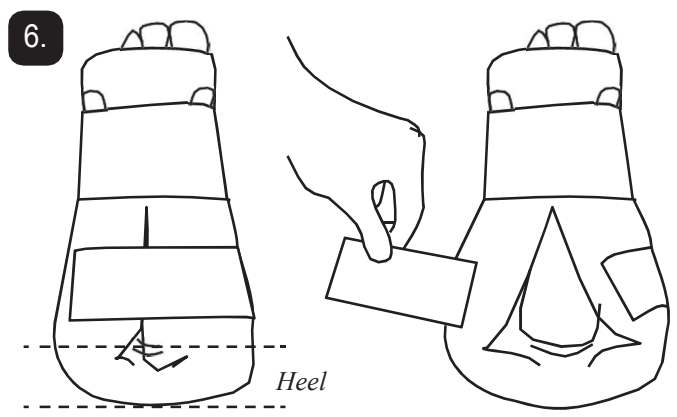

6. Assicurati che il tallone sia scarico. Il tallone aperto offre una maggiore visibilità per una ispezione.